Catalogue des analyses - Laboratoire

Electrophorèse des protéines

Urine 24h



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Prestations simultanées : dosage des protéines urinaires. Condition de réalisation : taux protéines urinaires >0.1 g/L
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/mois
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Electrophorèse-protéines, protéines-électrophorèse, lipoprotéines- électrophorèse, électrophorèse-lipoprotéines
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien <u>011 - Chimie clinique - Urine</u>
Renseignements à fournir	Les données de la récolte.



Pré analytique

Prélèvement

Mélanger à chaque miction, mettre au frigo entre les mictions. Bocal Instruction(s) particulière(s)

gradué de 2L (pour diurèse/récolte d'urine).

Matériel standard

1 **Ouantité**

Tube 8.5 ml pour urine **Contenant**

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Volume minimal de 10 ml. **Préparation**

Conserver l'urine dans congélateur à -20°C. **Conservation**

Envoyer congelé. **Conditions d'acheminement**

Acheminement

Réception des laboratoires Dépose des prélèvements

BH18-100 Site

Bugnon 46 **Adresse** 1011 Lausanne

439 **Pneumatique**

Lundi-vendredi: 6h30-18h30 Horaire d'ouverture de la réception

Samedi: 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés: 6h30-12h00

021 31 44 280 Téléphone

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde **Astreinte**

des laboratoires LCC-LCH

Réception des laboratoires Site web



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Résultats

Interprétation Paramètres : Albumine,

Alpha-1-globuline, Alpha-2-globuline, Gamma-globuline, Bande Ig monoclonale.

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 43.8

