



Catalogue des analyses - Laboratoire

Electrophorèse des protéines

Urine 24h

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Prestations simultanées : dosage des protéines urinaires.
Condition de réalisation : taux protéines urinaires >0.1 g/L

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/mois

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

Electrophorèse-protéines, protéines-électrophorèse, lipoprotéines-
électrophorèse, électrophorèse-lipoprotéines

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Renseignements à fournir

Les données de la récolte.

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Mélanger à chaque miction, mettre au frigo entre les mictions. Bocal gradué de 2L (pour diurèse/récolte d'urine).

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Volume minimal de 10 ml.

Conservation

Conserver l'urine dans congélateur à -20°C.

Conditions d'acheminement

Envoyer congelé.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Résultats

Interprétation	Paramètres : Albumine, Alpha-1-globuline, Alpha-2-globuline, Gamma-globuline, Bande Ig monoclonale.
-----------------------	--

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	43.8
--------------------	------