



Catalogue des analyses - Laboratoire

Everolimus

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin d'everolimus (intervalle de référence greffe dépendant).

Indication diagnostique Suivi thérapeutique, suspicion de taux insuffisant, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse.

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Synonyme Certican, SDZ RAD

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
999070
Lien
[013 - Chimie clinique - Médicaments](#)

Renseignements à fournir Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Instruction(s) particulière(s) - Délai d'équilibration : 4-5 jours à posologie constante
- Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 8 h post-dose)

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum

0.3 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Conserver le sang complet à 4°C (vol. min. 0.3 ml)

Conditions d'acheminement

A T° ambiante si l'acheminement se fait dans les 8 heures, sinon à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation	<p>Obtention des résultats : le mercredi pour les prélèvements reçus le mardi avant 12h00.</p> <p>Interprétation par la Pharmacologie clinique : durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500), sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique en cas d'urgence.</p>
-----------------------	--

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> LC-MS/MS
Technique	Mesure après extraction du sang complet

Post analytique

Tarif	
Tarif (CHF)	135
Prestation Tarmed	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min