Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00713

V17 - 13/11/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Folate (vitamine B9)

Sang



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse ne peut pas être ajoutée à une demande existante

Renseignement téléphonique	1 31 44 121
----------------------------	-------------

Horaire de réalisation	24h/24
------------------------	--------

Analyse accréditée	OUI
--------------------	-----

Synonyme Acide folique, folacine, folates, vitamine B9

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069 **Lien**

010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Envoi à l'abri de la lumière

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Microtube 0.3 ml sérum





Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum	0.3 ml
volume miimimum	

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Le même volume suffit si cumul avec Vitamine B12.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le sérum (vol min 0.3 ml).	
Conservation	Conserver le sérum à 4°C si <48 h, à -20°C si >48 h à l'a lumière.	bri de la
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à 4°C si <48 h, à -20°C si >48 h à l'abr	i de la lumière.
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Immédiatement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Analyseur cobas 8000 / e801, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

