



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Folate (vitamine B9)

Sang

## Informations générales

### Examen

**Ajout d'analyse** Cette analyse ne peut pas être ajoutée à une demande existante

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 121

**Horaire de réalisation** 24h/24

**Analyse accréditée** OUI

**Synonyme** Acide folique, folacine, folates, vitamine B9

### Prescription

**Formulaire de demande**  
Numéro de commande  
999069  
Lien  
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Instruction(s) particulière(s)** Envoi à l'abri de la lumière

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

### Matériel pédiatrique

**Quantité** 1

**Contenant** Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

---

**Volume minimum** 0.3 ml

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Le même volume suffit si cumul avec Vitamine B12.

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation** Centrifuger et décanter le sérum (vol min 0.3 ml).

**Conservation** Conserver le sérum à 4°C si <48 h, à -20°C si >48 h à l'abri de la lumière.

**Conditions d'acheminement** Envoyer le sérum à 4°C si <48 h, à -20°C si >48 h à l'abri de la lumière.

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement** Immédiatement

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280

**Site web** Réception des laboratoires 24/24



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Méthode analytique

**Analyseur** cobas 8000 / e801, Roche Diagnostics

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 11.8