



Catalogue des analyses - Laboratoire

Gastrine

Sang

Informations générales

Examen

Préparation du patient

- patient à jeun (si possible > 12 heures)
- stopper le traitement par des antiacides ou des anti-H2 24 heures avant le prélèvement
- stopper le traitement par des inhibiteurs de pompes à proton une semaine avant le prélèvement

Ajout d'analyse

Non

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Envoi effectué 1x/semaine le lundi.
Délai d'exécution au laboratoire sous-traitant: 1 semaine après réception.

Analyse accréditée

NON

Analyse sous-traitée

OUI

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Contenant

Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et séparer le sérum dans l'heure suivant le prélèvement.
Congeler l'échantillon immédiatement.

Conservation

Congelé à -20°C

Conditions d'acheminement

Sur glace sèche.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Acheminer le tube immédiatement pour que le sérum puisse être
séparé et congelé dans l'heure suivant la prise de sang.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Résultats

Délai de rendu	2 semaines
Méthode analytique	
Analyseur	Immulite 2000 / Siemens Healthineers

Technique	Dosage immunométrique chimiluminescent enzymatique
------------------	--

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	1 an
Tarif	
Tarif (CHF)	47.7