



Catalogue des analyses - Laboratoire

Glucagon

Sang



Informations générales

Examen

Préparation du patient	Patient à jeun
Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Envoi effectué 1x/semaine le lundi. Délai d'exécution au laboratoire sous-traitant: 1 semaine après réception.
Analyse accréditée	NON
Analyse sous-traitée	OUI
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien <u>010 - Chimie clinique - Sang</u>

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Obtention du contenant :

Pour les adultes, le tube BD Vacutainer 5 ml EDTA-K3/aprotinin s'obtient à la Réception des laboratoires

Prélèvement et acheminement :

- refroidir le tube sur de la glace pilée
- bien remplir le tube
- acheminer le prélèvement dans les 15 minutes au laboratoire pour que le plasma puisse être séparé et congelé dans les plus brefs délais après la prise de sang

Matériel standard

Quantité

1

Contenant(s) autre(s)

Tube BD Vacutainer 5 ml EDTA-K3/aprotinin

Volume minimum

Le tube refroidi sur glace doit être bien rempli

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum

Le tube refroidi sur glace doit être BIEN REMPLI et IMMEDIATEMENT transmis au laboratoire pour que le plasma puisse être séparé et congelé dans les plus brefs délais

Acheminement

Conditions d'acheminement

Envoyer le tube **sur glace pilée par porteur** au maximum **dans les 15 minutes** suivant le prélèvement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Délai de rendu 2 semaines

Méthode analytique

Technique Mercodia

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 1 an

Tarif

Tarif (CHF) 61.2