

Catalogue des analyses - Laboratoire

Glucose

LCR

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061232

Lien

[012 - Chimie clinique - Matériel spécial](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum

0.3 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum

0.3 ml (mettre dans Microtube 0.3 ml sérum)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Le même volume suffit si cumul avec Lactate, LDH et Protéines totales.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si le délai entre la ponction et l'arrivée au laboratoire dépasse 1h, centrifuger immédiatement le LCR à 2000 G durant 5 min, décanter et congeler à -20°C.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Envoyer immédiatement le prélèvement dans l'heure qui suit la ponction.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24**Téléphone** 021 31 44 280**Site web** [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique**Site** BH18-100**Adresse** Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique** 439**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H**Téléphone** 021 31 44 121**Site web** [Chimie clinique](#)

Résultats

Interprétation Intervalles de référence:
<https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dl/documents/DMLP-LCC-Val-Ref-LactatePyruvate-bHydroxybutyrate-Acetoacetate.pdf>

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Hexokinase

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 2.3