

Catalogue des analyses - Laboratoire

HGH (STH)

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Attention! Sous traitement de Pegvisomant (= Somavert®), le suivi ne doit pas se faire avec l'HGH car le résultat est ininterprétable; utiliser l'IGF-1.

Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence d'exécution

2x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

hormone de croissance humaine, somatotropine

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 2

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum 2 microtubes bien remplis
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré 8h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation A 4°C si < 8 h, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement Envoyer le sérum à 4°C si < 8 h, sinon à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu

2-3 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Chemiluminescence

Analyseur

LIAISON XL / DiaSorin



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

3 mois

Tarif

Tarif (CHF)

61.2