

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# HGH (STH)

Sang

## Informations générales

### Examen

**Indication diagnostique**

**Attention!** Sous traitement de Pegvisomant (= Somavert®), le suivi ne doit pas se faire avec l'HGH car le résultat est ininterprétable; utiliser l'IGF-1.

**Ajout d'analyse**

possible si sérothèque existante

**Renseignement téléphonique**

021 31 44 121

**Fréquence d'exécution**

2x/semaine

**Analyse accréditée**

OUI

**Spécialité**

- Chimie clinique

**Synonyme**

hormone de croissance humaine, somatotropine

**Prescription****Formulaire de demande**

**Numéro de commande**  
999069

**Lien**

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

**Prélèvement****Nature**

- Sang veineux

**Matériel standard****Quantité**

1

**Contenant**

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

2

**Contenant**

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999002

**Volume minimum**

2 microtubes bien remplis  
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Augmenter le nombre de microtubes

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré**

8h

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Centrifuger et décanter le sérum :  
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml  
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

**Conservation**

A 4°C si < 8 h, sinon à -20°C

**Conditions d'acheminement**

Envoyer le sérum à 4°C si < 8 h, sinon à -20°C

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

---

**Téléphone** 021 31 44 280

---

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Tube pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

---

**Téléphone** 021 31 44 121

---

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 2-3 jours

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Chemiluminescence

---

**Analyseur** LIAISON XL / DiaSorin



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 3 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 61.2