

Catalogue des analyses - Laboratoire

HGH (STH)

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Attention! Sous traitement de Pegvisomant (= Somavert®), le suivi ne doit pas se faire avec l'HGH car le résultat est ininterprétable; utiliser l'IGF-1.

Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence d'exécution

2x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

hormone de croissance humaine, somatotropine

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande**

061219

Lien[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

Volume minimum

2 microtubes bien remplis
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

8h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation

A 4°C si < 8 h, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement

Envoyer le sérum à 4°C si < 8 h, sinon à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	2-3 jours
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Chemiluminescence
Analyseur	LIAISON XL / DiaSorin



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 61.2