Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00734

V17 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

**IGFBP-3** 

Sang



## Informations générales

**Examen** 

Ajout d'analyse possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

**Fréquence d'exécution** 2x/semaine

Analyse accréditée

• Chimie clinique

**Synonyme** Insulin-like growth factor-binding protein 3

**Prescription** 

Formulaire de demande Numéro de commande

999069

Lien

<u>010 - Chimie clinique - Sang</u>

## Pré analytique

**Prélèvement** 

Nature • Sang veineux

**Matériel standard** 

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 2

**Contenant** Microtube 0.3 ml sérum





Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

**Volume minimum** 

2 microtubes bien remplis

Centrifuger et décanter le sérum :

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Suffit pour IGFBP3 concomitant.

Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

**Préparation** 

8h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	<ul> <li>volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml</li> <li>volume minimum pour l'analyse seule : 0.5 ml</li> </ul>
Conservation	A 4°C si < 8 h, sinon à -20°C
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à 4°C si < 8 h, sinon à -20°C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24



## **Analytique**

### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Résultats	
Délai de rendu	2-3 jours
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• ECLIA
Analyseur	e411 / Roche Diagnostics

# Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 54

