



Catalogue des analyses - Laboratoire

Insuline

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube
- Ne pas envoyer par poste pneumatique

Informations générales

Examen

Préparation du patient A jeun pour taux basal

Ajout d'analyse Non

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande
Numéro de commande
999069
Lien
010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Attention à éviter toute hémolyse !

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

Matériel pédiatrique**Quantité**

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum

1 microtube bien rempli
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Traitements du prélèvement pour requérants externes**Préparation**

Immédiatement centrifuger et décanter le plasma :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

Conservation

Immédiatement congeler le plasma à -20°C



Conditions d'acheminement A -20°C

Acheminement

Conditions d'acheminement

Ne pas envoyer par poste pneumatique (risque d'hémolyse) !
Envoyer le tube par porteur **dans les 30 minutes** suivant le
prélèvement.
Si l'acheminement n'est pas possible dans ce délai, centrifuger,
décanter et congeler le plasma.

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode • ECLIA

Analyseur cobas e 801 / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 18.9