Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00735

V18 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Insuline**

Sang



### Information(s) importante(s)

**Attention** 

- Acheminer immédiatement le tube
- Ne pas envoyer par poste pneumatique

### Informations générales

_			
Eva	m	_	-
rxa		_	

Préparation du patient	A jeun pour taux basal
Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien

010 - Chimie clinique - Sang



### Pré analytique

#### **Prélèvement**

• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Attention à éviter toute hémolyse!

**Matériel standard** 

Quantité <sup>1</sup>

**Contenant**Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande: 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

#### Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum

1 microtube bien rempli
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augment

Augmenter le nombre de microtubes

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**Immédiatement centrifuger et décanter le plasma :

volume idéal (y compris sérothèque) : 1 mlvolume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

**Conservation** Immédiatement congeler le plasma à -20°C



Conditions d'acheminement	A -20°C	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Ne pas envoyer par poste pneumatique (risque d'hémolyse)! Envoyer le tube par porteur dans les 30 minutes suivant le prélèvement. Si l'acheminement n'est pas possible dans ce délai, centrifuger, décanter et congeler le plasma.	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	



### **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• ECLIA
Analyseur	cobas e 801 / Roche Diagnostics

## Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

**Tarif** 

**Tarif (CHF)** 18.9

