



Catalogue des analyses - Laboratoire

Insuline

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

Ne pas envoyer par poste pneumatique

Informations générales

Examen

Préparation du patient A jeun pour taux basal

Ajout d'analyse Non

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
061219
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Attention à éviter toute hémolyse !


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium

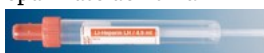

Monovette bouchon orange - N° commande : 510208

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette bouchon orange - N° commande : 511158

Volume minimum

1 microtube bien rempli
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Immédiatement centrifuger et décanter le plasma :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

Conservation

Immédiatement congeler le plasma à -20°C

Conditions d'acheminement

A -20°C

Acheminement

Conditions d'acheminement

Ne pas envoyer par poste pneumatique (risque d'hémolyse) !
Envoyer le tube par porteur **dans les 30 minutes** suivant le prélèvement.
Si l'acheminement n'est pas possible dans ce délai, centrifuger,

décanter et congeler le plasma.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web[Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- ECLIA

Analyseur

cobas e 801 / Roche Diagnostics



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

3 mois

Tarif

Tarif (CHF)

18.9