

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Lactate

LCR

## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	24h/24
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chimie clinique</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	Acide lactique

### Prescription

<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 061232 <b>Lien</b> <a href="#">012 - Chimie clinique - Matériel spécial</a>
------------------------------	--

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquide céphalo-rachidien (LCR)</li> </ul>
---------------	---

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

**Volume minimum**

0.3 ml

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

**Volume minimum**

0.3 ml (mettre dans Microtube 0.3 ml sérum)

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Le même volume suffit si cumul avec Glucose, LDH et Protéines totales.

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Si le délai entre la ponction et l'arrivée au laboratoire dépasse 1h, centrifuger immédiatement le LCR à 2000 G durant 5 min, décanter et congeler à -20°C.

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Envoyer immédiatement le prélèvement dans l'heure qui suit la ponction.

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24**Téléphone** 021 31 44 280**Site web** [Réception des laboratoires 24/24](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique**Site** BH18-100**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique** 439**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H**Téléphone** 021 31 44 121**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Interprétation** Intervalle de référence:  
<https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dl/documents/DMLP-LCC-Val-Ref-LactatePyruvate-bHydroxybutyrate-Acetoacetate.pdf>

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Lactate oxydase

**Analyseur** cobas 8000, Roche Diagnostics

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 20.7