Catalogue des analyses - Laboratoire

## **Lactate**

LCR

## Informations générales

C		_	_
Exa	m	е	n

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Acide lactique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien 012 - Chimie clinique - Matériel spécial

## Pré analytique

ь.	. 4 1	ι.			_		_
М	rél	e	ve	m	e	п	T

• Liquide céphalo-rachidien (LCR)

**Matériel standard** 

Quantité

**Contenant** Tube conique polypropylène stérile 15 ml

1





Bouchon bleu - N° commande : 929110

 $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \be$ 

Matériel pédiatrique

**Quantité** 

**Contenant** Tube conique polypropylène stérile 15 ml





Bouchon bleu - N° commande : 929110

#### **Volume minimum**

0.3 ml (mettre dans Microtube 0.3 ml sérum)

# Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Le même volume suffit si cumul avec Glucose, LDH et Protéines totales.

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### **Préparation**

Si le délai entre la ponction et l'arrivée au laboratoire dépasse 1h, centrifuger immédiatement le LCR à 2000 G durant 5 min, décanter et congeler à -20°C.

#### **Acheminement**

#### **Conditions d'acheminement**

Envoyer immédiatement le prélèvement dans l'heure qui suit la ponction.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439



Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
riorane a cavertare de la reception	

**Téléphone** 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24

### **Analytique**

**Prestataire** 

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

Site web Chimie clinique

Résultats

**Interprétation**Interprétation
Interprétation

 $\underline{https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dl/documents/DMLP-LCC-Val-}$ 

 $\underline{Ref-LactatePyruvate-bHydroxybutyrate-Acetoacetate.pdf}$ 

Méthode analytique

Principe de la méthode • Lactate oxydase

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

## Post analytique

**Tarif** 

Tarif (CHF)

