



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Lactate/Pyruvate

Sang



## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	2x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Synonyme</b>	Acide lactique, acide pyruvique, lactate, L-lactate, pyruvate
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999069 <b>Lien</b> <u><a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a></u>

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Instruction(s) particulière(s)

Le prélèvement doit être fait sur acide perchlorique 0.6 N (PCA).  
Obtenir le récipient : 021 31 44 280.

Suivre scrupuleusement le protocole suivant :  
Placer le tube de PCA dans la glace pilée au moins 10 min avant le  
prélèvement.  
Introduire précisément 1 ml de sang natif dans le tube contenant 1 ml  
de PCA refroidi.  
Agiter immédiatement et vigoureusement.  
Replacer le tube dans la glace.

#### Matériel standard

##### Quantité

1

##### Contenant

Tube PCA  
Sur demande au desk du BH18-100 - tél 44 280

##### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si corps cétoniques quantitatifs aussi demandés, le même tube  
suffit.

#### Matériel néonatalogie

##### Quantité

1

##### Contenant

Tube PCA  
Sur demande au desk du BH18-100 - tél 44 280

##### Volume minimum

1 ml

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

##### Conservation

Conserver le tube "PCA + sang complet" à -20°C.

##### Conditions d'acheminement

Envoyer le tube "PCA + sang complet" sur glace carbonique.

#### Acheminement

##### Conditions d'acheminement

Amener le tube dans la glace le plus rapidement possible par porteur à  
la réception des laboratoires.

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

##### Site

BH18-100

<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Résultats

<b>Interprétation</b>	Intervalles de référence : <a href="https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dl/documents/DMLP-LCC-Val-Ref-LactatePyruvate-bHydroxybutyrate-Acetoacetate.pdf">https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dl/documents/DMLP-LCC-Val-Ref-LactatePyruvate-bHydroxybutyrate-Acetoacetate.pdf</a>
-----------------------	---

## Post analytique

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	54
--------------------	----