



Catalogue des analyses - Laboratoire

Lactate/Pyruvate

Sang



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

2x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

Acide lactique, acide pyruvique, lactate, L-lactate, pyruvate

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Le prélèvement doit être fait sur acide perchlorique 0.6 N (PCA).
Obtenir le récipient : 021 31 44 280.

Suivre scrupuleusement le protocole suivant :
Placer le tube de PCA dans la glace pilée au moins 10 min avant le
prélèvement.
Introduire précisément 1 ml de sang natif dans le tube contenant 1 ml
de PCA refroidi.
Agiter immédiatement et vigoureusement.
Replacer le tube dans la glace.

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube PCA Sur demande au desk du BH18-100 - tél 44 280
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Si corps cétoniques quantitatifs aussi demandés, le même tube suffit.

Matériel néonatalogie

Quantité	1
Contenant	Tube PCA Sur demande au desk du BH18-100 - tél 44 280
Volume minimum	1 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	Conserver le tube "PCA + sang complet" à -20°C.
Conditions d'acheminement	Envoyer le tube "PCA + sang complet" sur glace carbonique.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Amener le tube dans la glace le plus rapidement possible par porteur à la réception des laboratoires.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaires d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaires d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation

Intervalles de référence :

<https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dl/documents/DMLP-LCC-Val-Ref-LactatePyruvate-bHydroxybutyrate-Acetoacetate.pdf>

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	54
--------------------	----