



Catalogue des analyses - Laboratoire

Lactate/Pyruvate

Sang



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Acide lactique, acide pyruvique, lactate, L-lactate, pyruvate
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien <u>010 - Chimie clinique - Sang</u>

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Le prélèvement doit être fait sur acide perchlorique 0.6 N (PCA).
Obtenir le récipient : 021 31 44 280.

Suivre scrupuleusement le protocole suivant :
Placer le tube de PCA dans la glace pilée au moins 10 min avant le
prélèvement.
Introduire précisément 1 ml de sang natif dans le tube contenant 1 ml
de PCA refroidi.
Agiter immédiatement et vigoureusement.
Replacer le tube dans la glace.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube PCA
Sur demande au desk du BH18-100 - tél 44 280

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si corps cétoniques quantitatifs aussi demandés, le même tube
suffit.

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube PCA
Sur demande au desk du BH18-100 - tél 44 280

Volume minimum

1 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Conserver le tube "PCA + sang complet" à -20°C.

Conditions d'acheminement

Envoyer le tube "PCA + sang complet" sur glace carbonique.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Amener le tube dans la glace le plus rapidement possible par porteur à
la réception des laboratoires.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation

Intervalles de référence :

<https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dl/documents/DMLP-LCC-Val-Ref-LactatePyruvate-bHydroxybutyrate-Acetoacetate.pdf>

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	54
--------------------	----