Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00745

V19 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Lactate/Pyruvate

LCR



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Acide lactique, acide pyruvique, lactate, L-lactate, pyruvate
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien

<u>012 - Chimie clinique - Matériel spécial</u>



Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Liquide céphalo-rachidien (LCR)
Instruction(s) particulière(s)	Le prélèvement doit être fait sur acide perchlorique 0.6 N (PCA). Obtenir le récipient : 021 31 44 280.
	Suivre scrupuleusement le protocole suivant : Placer le tube de PCA dans la glace pilée au moins 10 min avant le prélèvement. Introduire précisément 1 ml de LCR dans le tube contenant 1 ml de PCA
	refroidi. Agiter immédiatement et vigoureusement. Replacer le tube dans la glace
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube PCA Sur demande au desk du BH18-100 - tél 44 280
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Si corps cétoniques quantitatifs aussi demandés, le même tube suffit.
Traitement du prélèvement pour	requérants externes
Conservation	Conserver le tube "PCA + LCR complet" à -20°C.
Conditions d'acheminement	Envoyer le tube "PCA + LCR" sur glace carbonique.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Amener le tube dans la glace le plus rapidement possible par porteur à la réception des laboratoires.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439



Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi: 6h30-18h30

Samedi: 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h0	0

Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Résultats

Interprétation

Intervalles de référence:

https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dl/documents/DMLP-LCC-ValRef-LactatePyruvate-bHydroxybutyrate-Acetoacetate.pdf

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 54

