



Catalogue des analyses - Laboratoire

Leptine

Sang



Informations générales

Examen

Préparation du patient

Par sa prescription de l'analyse, le prescripteur atteste que le patient a été informé et a donné son accord pour la facturation de l'analyse.

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

2x/mois

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 2.6 ml sérum sans gel</p>  <p>Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008</p>
Volume minimum	300 µl
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Centrifuger et décanter le sérum. Volume minimum 300 µl. Congeler à -20°C.
Conservation	-20°C.
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum congelé sur glace carbonique.
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	68
Condition(s) spéciale(s)	Cette analyse ne fait pas partie de la liste des analyses (LA) prises en charge par l'assurance obligatoire des soins (AOS)