

Catalogue des analyses - Laboratoire

Lithium - Sang

Patients CHUV uniquement

Informations générales

Examen

But de l'analyse Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de lithium (intervalle de référence disponible).

Indication diagnostique Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, doute sur la compliance.

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Fréquence et/ou horaire d'exécution 08h00-16h00, jours ouvrables (si demande en urgence, contacter le laboratoire)

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Synonyme Litarex, Lithiofor, Priadel, Quilonorm

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
061207
Lien
[013 - Chimie clinique - Médicaments](#)

Renseignements à fournir Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

- Délai d'équilibration : 5-7 jours à posologie constante
- Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 6 h post-dose)


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel

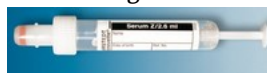

Monovette bouchon blanc - N° commande : 510312

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

Volume minimum

1 microtube bien rempli.
(requérants externes: 2 microtubes bien remplis)

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le sérum:
- volume idéal : 500 µl
- volume minimum : 200 µl

Conservation

à 4°C

Conditions d'acheminement

à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Interprétation Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500),
sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique **en cas
d'urgence.**

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Colorimétrique

Analyseur Integra 400 Plus / Roche Diagnostics

Technique Réaction avec un composé de porphyrine substituée en milieu alcalin.



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

11.2

Prestation Tarmed

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min