



Catalogue des analyses - Laboratoire

Méthotrexate

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Condition particulière d'acheminement

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de méthotrexate (taux visé dépendant du protocole oncologique).

Indication diagnostique

Lors d'administration de méthotrexate à haute dose pour guider le sauvetage par l'acide folinique (Leucovorin).

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Rendez-vous téléphonique nécessaire

Prévenir le laboratoire (021 31 **44 166** ou 021 31 **44 280**) du protocole avec le "timing" prévu pour les différents prélèvements et indiquer le délai maximal pour le rendu des résultats.

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Selon le protocole oncologique appliqué

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Améthoptérine, Methotrexat, Metoject

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999070

Lien

[013 - Chimie clinique - Médicaments](#)

Lien

[TDM, suivi thérapeutique des médicaments, recommandations](#)

Renseignements à fournir

Documenter l'heure réelle de la prise de sang et remplir scrupuleusement toutes les rubriques.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Moment de la prise de sang : selon le protocole oncologique appliqué

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

Matériel pédiatrique

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum

2 microtubes bien remplis

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :

- volume idéal : 500 µl
- volume minimum : 300 µl

Conservation

à l'abri de la lumière (papier aluminium) et à 4°C (si > 48 h, congeler à -20°C)

Conditions d'acheminement

à 4°C si l'acheminement se fait dans les 48 h, sinon à -20°C

Acheminement



Conditions d'acheminement	Envoi immédiat à l'abri de la lumière (papier aluminium)
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500), sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique **en cas d'urgence**.

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• CMIA
Analyseur	Architect i / Abbott

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	75.6
Prestation Tarmed	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min