Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00756

V14 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Méthotrexate

Sang



## Information(s) importante(s)

#### **Attention**

• Condition particulière d'acheminement

### Informations générales

#### **Examen**

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de méthotrexate (taux visé dépendant du protocole oncologique).	
Indication diagnostique	Lors d'administration de méthotrexate à haute dose pour guider le sauvetage par l'acide folinique (Leucovorin).	
Renseignement téléphonique	021 31 44 121	
Rendez-vous téléphonique nécessaire	Prévenir le laboratoire (021 31 <b>44 166</b> ou 021 31 <b>44 280</b> ) du protocole avec le "timing" prévu pour les différents prélèvements et indiquer le délai maximal pour le rendu des résultats.	
Fréquence et/ou horaire d'exécution  Selon le protocole oncologique appliqué		
Analyse accréditée	OUI	
Spécialité	Chimie clinique	
Synonyme	Améthoptérine, Methotrexat, Metoject	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande 999070 Lien 013 - Chimie clinique - Médicaments	
Renseignements à fournir	Documenter l'heure réelle de la prise de sang et remplir scrupuleusement toutes les rubriques.	



### Pré analytique

#### **Prélèvement**

Nature

· Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Moment de la prise de sang : selon le protocole oncologique appliqué

**Matériel standard** 

Quantité

1

2

**Contenant** 

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 999008

Matériel pédiatrique

Quantité

**Contenant** 

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

**Volume minimum** 

2 microtubes bien remplis

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le sérum :

- volume idéal : 500 μl - volume minimum : 300 μl

**Conservation** à l'abri de la lumière (papier aluminium) et à 4°C (si > 48 h, congeler à

-20°C)

**Conditions d'acheminement** 

à 4°C si l'acheminement se fait dans les 48 h, sinon à -20°C

**Acheminement** 



Conditions d'acheminement	Envoi immédiat à l'abri de la lumière (papier aluminium)
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24.



## **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	<u>Chimie clinique</u>	
Résultats		
Interprétation	Durant les heures ouvrables par le consultant TDM (02 sinon sur demande au piquet de pharmacologie cliniqu d'urgence.	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	• CMIA	
Analyseur	Architect i / Abbott	

Laboratoire de chimie clinique

### Post analytique

**Tarif** 

Tarif (CHF)	75.6
Prestation Tarmed	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min