

Catalogue des analyses - Laboratoire

NSE

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

- Condition particulière d'acheminement
- Ne pas envoyer par poste pneumatique

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Fréquence d'exécution 2x/semaine

Analyse accréditée OUI

• Chimie clinique

Synonyme Neuron specific enolase, énolase spécifique des neurones

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069 **Lien**

<u>010 - Chimie clinique - Sang</u>

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Attention à éviter toute hémolyse!!

Acheminer le prélèvement par porteur dans les 60 minutes au

laboratoire.

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel





Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Microtube 0.3 ml sérum

2



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum

2 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Immediatement centrifuger et decanter le serum ((les prelevement
	même légèrement hémolysés ne conviennent pas:	si tel est le cas.

demander de repiquer):

- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml

- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation Immédiatement congeler le sérum à -20°C

Conditions d'acheminement A -20°C.

Acheminement

Conditions d'acheminementAfin d'éviter toute hémolyse, apporter le prélèvement **par porteur** au

maximum **dans les 60 minutes** suivant la prise de sang.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439



Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique
Résultats	
Délai de rendu	2-3 jours
Méthode analytique	
Analyseur	Kryptor GOLD / ThermoFisher Scientific
Technique	TRACE
Post analytique	
Conservation après examens	
Aliquote congelé	1 an
Tarif	
Tarif (CHF)	33.3

