



Catalogue des analyses - Laboratoire

NSE

Sang

Information(s) importante(s)

- Attention**
- Condition particulière d'acheminement
 - Ne pas envoyer par poste pneumatique

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> • Chimie clinique
Synonyme	Neuron specific enolase, émolase spécifique des neurones
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 999069</p> <p>Lien 010 - Chimie clinique - Sang</p>

Pré analytique

Prélèvement

- Nature**
- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Attention à éviter toute hémolyse !!
Acheminer le prélèvement **par porteur dans les 60 minutes** au laboratoire.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 2

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum 2 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation **Immédiatement** centrifuger et décanter le sérum (**les prélèvements même légèrement hémolysés ne conviennent pas**; si tel est le cas, demander de repiquer) :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation **Immédiatement** congeler le sérum à -20°C

Conditions d'acheminement A -20°C.

Acheminement

Conditions d'acheminement Afin d'éviter toute hémolyse, apporter le prélèvement **par porteur** au maximum **dans les 60 minutes** suivant la prise de sang.

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Délai de rendu 2-3 jours

Méthode analytique

Analyseur Kryptor GOLD / ThermoFisher Scientific

Technique TRACE

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 1 an

Tarif

Tarif (CHF) 33.3