Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00763

V17 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Estradiol (E2)

Sang



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation

Analyse accréditée OUI

• Chimie clinique

Synonyme Oestradiol, E2

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069 **Lien**

010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 1 (sans ajout possible)

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium





Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le plasma Vol idéal (y compris sérothèque): 1ml
	Vol min pour l'analyse seule: 0.2 ml
Conservation	Conserver le plasma à 4°C si > 24 h conserver à -20°C
Conditions d'acheminement	Transporteur: à T° ambiante Poste: à 4°C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	<u>Chimie clinique</u>	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	• ECLIA	
Analyseur	cobas e 801 / Roche Diagnostics	
Post analytique		
Tarif		
Tarif (CHF)	17.4	
Condition(s) spéciale(s)	Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des anal facturables en sus	lyses

