



Catalogue des analyses - Laboratoire

Estradiol (E2)

Sang

Informations générales

Examen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 121 |
| Horaire de réalisation | 24h/24 |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | <ul style="list-style-type: none"> Chimie clinique |
| Synonyme | Oestradiol, E2 |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang |


Pré analytique


Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

| | |
|---|--|
| Quantité | 1 |
| Contenant | Tube 4.9 ml héparinate de lithium  Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991 |
| Règle(s) si cumul avec d'autres analyses | Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium le même tube suffit |
| Matériel pédiatrique | |
| Quantité | 1 (sans ajout possible) |
| Contenant | Microtube 0.3 ml héparinate de lithium |

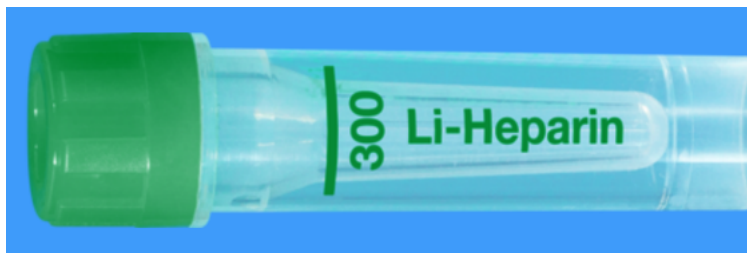

Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

| | |
|--|--|
| Préparation | Centrifuger et décanter le plasma Vol idéal (y compris sérothèque): 1ml Vol min pour l'analyse seule: 0.2 ml |
| Conservation | Conserver le plasma à 4°C si > 24 h conserver à -20°C |
| Conditions d'acheminement | Transporteur: à T° ambiante Poste: à 4°C |
| Acheminement | |
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture de la réception | 24h/24 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Site web | <u>Réception des laboratoires 24/24.</u> |

Analytique

Prestataire

| | |
|--|-----------------------------------|
| Prestataire | Laboratoire de chimie clinique |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaires d'ouverture du laboratoire | 24/24H |
| Téléphone | 021 31 44 121 |
| Site web | Chimie clinique |

Méthode analytique

| | |
|-------------------------------|---|
| Principe de la méthode | <ul style="list-style-type: none"> ECLIA |
| Analyseur | cobas e 801 / Roche Diagnostics |

Post analytique

Tarif

| | |
|---------------------------------|---|
| Tarif (CHF) | 17.4 |
| Condition(s) spéciale(s) | Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus |