



Catalogue des analyses - Laboratoire

Estradiol (E2)

Sang

Informations générales

Examen

| | |
|-----------------------------------|---|
| Renseignement téléphonique | 021 31 44 121 |
| Horaire de réalisation | 24h/24 |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | <ul style="list-style-type: none"> Chimie clinique |
| Synonyme | Oestradiol, E2 |

Prescription


| | |
|------------------------------|--|
| Formulaire de demande | Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang |
|------------------------------|--|

Pré analytique

Prélèvement

| | |
|---------------|--|
| Nature | <ul style="list-style-type: none"> Sang veineux |
|---------------|--|


Matériel standard

| | |
|------------------|--|
| Quantité | 1 |
| Contenant | Tube 4.9 ml héparinate de lithium  Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991 |

| | |
|---|--|
| Règle(s) si cumul avec d'autres analyses | Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium le même tube suffit |
|---|--|

Matériel pédiatrique

| | |
|------------------|--|
| Quantité | 1 (sans ajout possible) |
| Contenant | Microtube 0.3 ml héparinate de lithium |

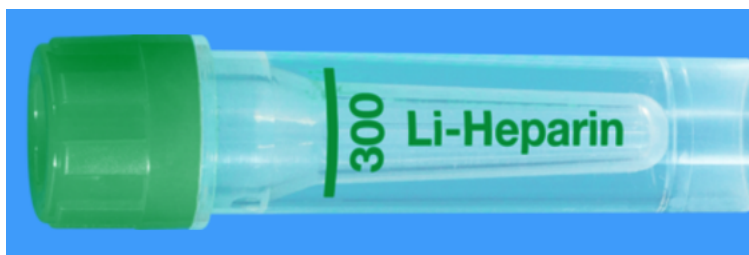

Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le plasma
Vol idéal (y compris sérothèque): 1ml

Vol min pour l'analyse seule: 0.2 ml

Conservation Conserver le plasma à 4°C
si > 24 h conserver à -20°C

Conditions d'acheminement Transporteur: à T° ambiante
Poste: à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

| | |
|---|-----------------------------------|
| Prestataire | Laboratoire de chimie clinique |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | 24/24H |
| Téléphone | 021 31 44 121 |
| Site web | Chimie clinique |

Méthode analytique

| | |
|-------------------------------|---|
| Principe de la méthode | <ul style="list-style-type: none">ECLIA |
| Analyseur | cobas e 801 / Roche Diagnostics |

Post analytique

| | |
|---------------------------------|---|
| Tarif | |
| Tarif (CHF) | 17.4 |
| Condition(s) spéciale(s) | Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus |