Catalogue des analyses - Laboratoire

Oxalate

Urine 24h



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Prestations simultanées : créatinine.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Acide oxalique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien <u>011 - Chimie clinique - Urine</u>
Renseignements à fournir	Données de la récolte: durée exacte et volume. Si urine acidifiée indiquer "+ HCl"



Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Bouteille plastique col large rond

Heure 0 (moment de la première miction considérée): Procéder à la miction dans les toilettes (urines jetées) Noter la date et l'heure
 Dès ce moment et jusqu'au lendemain à la même heure (heure 24), récolter toutes les mictions dans la (les) bouteille(s). Conserver la (les) bouteille(s) à 4°C entre les mictions

3. Heure 24 (précisement) : terminer la récolte en procédant à une

dernière miction. Important: bien mélanger l'entier de la récolte (dans un même récipient si plusieurs bouteilles) juste avant le prélèvement

d'un échantillon dans le tube.

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

1

Z Suhu

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Traitement du prélèvement pour requérants externes

PréparationImportant! Juste avant de prélever l'échantillon d'urine à envoyer,

bien mélanger l'entier de la récolte.

Conservation Conserver l'urine à -20°C.

Conditions d'acheminementAcidifier l'urine et envoyer congelée sur glace carbonique.

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30

Samedi: 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés: 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280



Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Résultats

Interprétation Paramètres: Oxalate, oxalate/créatinine, oxalate 24h.

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

