



Catalogue des analyses - Laboratoire

Oxalate

Urine 24h

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Prestations simultanées : créatinine.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Acide oxalique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien 011 - Chimie clinique - Urine
Renseignements à fournir	Données de la récolte: durée exacte et volume. Si urine acidifiée indiquer "+ HCl"

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Bouteille plastique col large rond

1. Heure 0 (moment de la première miction considérée) : Procéder à la miction dans les toilettes (urines jetées) Noter la date et l'heure
2. Dès ce moment et jusqu'au lendemain à la même heure (heure 24), récolter toutes les mictions dans la (les) bouteille(s). Conserver la (les) bouteille(s) à 4°C entre les mictions
3. Heure 24 (précisément) : terminer la récolte en procédant à une dernière miction. Important: bien mélanger l'entier de la récolte (dans un même récipient si plusieurs bouteilles) juste avant le prélèvement d'un échantillon dans le tube.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Important ! Juste avant de prélever l'échantillon d'urine à envoyer, bien mélanger l'entier de la récolte.

Conservation

Conserver l'urine à -20°C.

Conditions d'acheminement

Acidifier l'urine et envoyer congelée sur glace carbonique.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Interprétation Paramètres: Oxalate, oxalate/créatinine, oxalate 24h.

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 33.3