Catalogue des analyses - Laboratoire

Oxalate

Urine fraîche



Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Prestations simultanées : créatinine
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Acide oxalique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien <u>011 - Chimie clinique - Urine</u>
Renseignements à fournir	Si urine acidifiée indiquer "+ HCl".



Pré analytique

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Volume min 3.0 ml.
Conservation	Conserver l'urine à -20°C.
Conditions d'acheminement	Acidifier l'urine et envoyer congelée sur glace carbonique.
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pnoumatique	439

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

