



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Oxymétrie

Sang



## Informations générales

### Examen

#### Ajout d'analyse

Oxymétrie uniquement : hémoglobine totale, carboxyhémoglobine, méthémoglobine, oxyhémoglobine et l'hémoglobine réduite sont mesurées en même temps  
La gazométrie, le lactate, le calcium ionisé peuvent être effectués sur le même prélèvement  
(voir les fiches concernées)

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Analyse accréditée

OUI

#### Synonyme

Oxyhémoglobine, carboxyhémoglobine, CO, méthémoglobine, hémoglobine réduite, monoxyde de carbone

#### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

999069

##### Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

#### Renseignements à fournir

Température du patient  
FIO2

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Instruction(s) particulière(s)

Éliminer immédiatement les bulles d'air après le prélèvement  
Bien mélanger l'échantillon verticalement et horizontalement sans  
secouer (après avoir éliminé l'air)  
Ne pas laisser reposer l'échantillon, le mélanger à intervalle régulier  
Ne pas casser le piston de la seringue enlever impérativement l'aiguille  
Ne pas envoyer par poste pneumatique  
Stabilité de l'échant. max 30 min

#### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Seringue à gazométrie  
NULL

**Volume minimum** 1 ml

#### Stabilité maximale avant analyse

**Ambiant** 30 min

#### Acheminement

**Conditions d'acheminement** Amener immédiatement par porteur

<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>



## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)**

37.8

**Condition(s) spéciale(s)**

Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus