



Catalogue des analyses - Laboratoire

Parathormone (PTH)

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Non

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Fréquence d'exécution

2x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

Hormone parathyroïdienne

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Si transport au laboratoire pas possible **dans un délai de 60 minutes**, centrifuger, décanter et congeler le sérum.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum

2 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Immédiatement centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation

Immédiatement congeler le sérum à -20°C



Conditions d'acheminement A - 20°C

Acheminement

Conditions d'acheminement Acheminer le tube immédiatement mais au maximum **dans les 60 minutes** suivant le prélèvement.
Si l'acheminement n'est pas possible dans ce délai, centrifuger, décanter et congeler le sérum.

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	2-3 jours
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Chemiluminescence

Analyseur	LIAISON XL/ DiaSorin
------------------	----------------------

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	3 mois
Tarif	
Tarif (CHF)	33.3