Catalogue des analyses - Laboratoire

# Parathormone (PTH)

Sang



## Information(s) importante(s)

### **Attention**

• Acheminer immédiatement le tube

## Informations générales

### **Examen**

Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Hormone parathyroïdienne
Prescription	
Formulaire de demande	<b>Numéro de commande</b> 999069 <b>Lien</b> <u>010 - Chimie clinique - Sang</u>



### Pré analytique

#### **Prélèvement**

• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Si transport au laboratoire pas possible **dans un délai de 60 minutes**, centrifuger, décanter et congeler le sérum.

**Matériel standard** 

Quantité

**Contenant** 

Tube 4.9 ml sérum sans gel

1

2



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité

**Contenant** 

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

**Volume minimum** 

2 microtubes bien remplis

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Immédiatement centrifuger et décanter le sérum :

- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml

- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

**Conservation** Immédiatement congeler le sérum à -20°C



Conditions d'acheminement	A - 20°C	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Acheminer le tube immédiatement mais au maximum <b>d minutes</b> suivant le prélèvement. Si l'acheminement n'est pas possible dans ce délai, cent décanter et congeler le sérum.	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	



## **Analytique**

### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Résultats	
Délai de rendu	2-3 jours
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Chemiluminescence
Analyseur	LIAISON XL/ DiaSorin

## Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 33.3

