

Catalogue des analyses - Laboratoire



Liquide pleural



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien 012 - Chimie clinique - Matériel spécial



Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Prélever l'échantillon en conditions anaérobiques directement dans la

seringue à gazométrie.

Eliminer immédiatement les éventuelles bulles d'air présentes dans le

prélèvement.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant Seringue à gazométrie

NULL

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Seringue à gazométrie

NULL

Volume minimum 0.3 ml

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant ^{1h}

Acheminement

Conditions d'acheminement

Acheminer rapidement l'échantillon.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46 1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280



Site web Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46

1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web Chimie clinique

Méthode analytique

Analyseur RapidPoint 500, Siemens Healthineers

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

