



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# pH

Liquide pleural



## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	24h/24
<b>Analyse accréditée</b>	OUI

### Prescription

<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 061232 <b>Lien</b> <a href="#">012 - Chimie clinique - Matériel spécial</a>
------------------------------	--

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Instruction(s) particulière(s)

Prélever l'échantillon en conditions anaérobiques directement dans la seringue à gazométrie.

Éliminer immédiatement les éventuelles bulles d'air présentes dans le prélèvement.

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Seringue à gazométrie  
NULL

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Seringue à gazométrie  
NULL

#### Volume minimum

0.3 ml

### Stabilité maximale avant analyse

#### Ambiant

1h

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Acheminer rapidement l'échantillon.

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

#### Téléphone

021 31 44 280



**Site web**

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

**Prestataire**

**Prestataire**

Laboratoire de chimie clinique

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

24/24H

**Téléphone**

021 31 44 121

**Site web**

[Chimie clinique](#)

**Méthode analytique**

**Analyseur**

RapidPoint 500, Siemens Healthineers

## Post analytique

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

23.4