



Catalogue des analyses - Laboratoire

pH

Liquide pleural



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061232

Lien

[012 - Chimie clinique - Matériel spécial](#)

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Prélever l'échantillon en conditions anaérobiques directement dans la seringue à gazométrie.

Eliminer immédiatement les éventuelles bulles d'air présentes dans le prélèvement.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Seringue à gazométrie
NULL

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Seringue à gazométrie
NULL

Volume minimum

0.3 ml

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

1h

Acheminement

Conditions d'acheminement

Acheminer rapidement l'échantillon.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280



Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

Chimie clinique

Méthode analytique

Analyseur

RapidPoint 500, Siemens Healthineers

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

23.4