Catalogue des analyses - Laboratoire

Préalbumine

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse Cette analyse

peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation

Analyse accréditée OUI

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999069 **Lien**

<u>010 - Chimie clinique - Sang</u>

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium





Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter plasma (vol. min. 0.2 ml)	
Conservation	Conserver le plasma à 4°C si <48 h, à -20°C si >48h.	
Conditions d'acheminement	Envoyer le plasma à 4°C si <48 heures, sinon sur glace carbonique.	
Acheminement		
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24</u>	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

