



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Profil protéines

LCR / sérum

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Détection de bandes oligoclonales IgG dans le LCR et le sérum.
<b>Indication diagnostique</b>	Diagnostic des maladies neurologiques à composante inflammatoire (IgG intrathécales, ...)
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI

**Synonyme** Bandes IgG oligoclonales, isoélectrofocalisation des IgG.

### Prescription

<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 061232 <b>Lien</b> <a href="#">012 - Chimie clinique - Matériel spécial</a>
------------------------------	--

**Renseignements à fournir** Cocher profil des protéines

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquide céphalo-rachidien (LCR)</li> <li>Sang</li> </ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	+ 1 tube sérum.
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

**Contenant(s) autre(s)**

Joindre tube 4.9 ml sérum sans gel.

**Volume minimum**

LCR: min. 2 ml

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Centrifuger durant 5 min à 3600G.  
Décanter le sérum, volume minimum: 2 ml.  
Décanter le LCR, volume minimum: 2 ml.

**Conservation**

Sérum et LCR : -20°C.

**Conditions d'acheminement**

Congelé.

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Interprétation** Présence de bandes oligoclonales IgG LCR et sérum.  
Paramètres concomitants mesurés: Protéines totales LCR, quotient albumine LCR/sérum; électrophorèse des protéines sériques.

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 240.3