



Catalogue des analyses - Laboratoire

Profil protéines

LCR / sérum

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Détection de bandes oligoclonales IgG dans le LCR et le sérum.
Indication diagnostique	Diagnostic des maladies neurologiques à composante inflammatoire (IgG intrathécales, ...)
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI

Synonyme Bandes IgG oligoclonales, isoélectrofocalisation des IgG.

Prescription

Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien 012 - Chimie clinique - Matériel spécial
------------------------------	--

Renseignements à fournir Cocher profil des protéines

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> Liquide céphalo-rachidien (LCR) Sang
---------------	---

Instruction(s) particulière(s) + 1 tube sérum.

Matériel standard

Quantité	1
-----------------	---

Contenant Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Contenant(s) autre(s)

Joindre tube 4.9 ml sérum sans gel.

Volume minimum

LCR: min. 2 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger durant 5 min à 3600G.
Décanter le sérum, volume minimum: 2 ml.
Décanter le LCR, volume minimum: 2 ml.

Conservation

Sérum et LCR : -20°C.

Conditions d'acheminement

Congelé.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439



Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Interprétation Présence de bandes oligoclonales IgG LCR et sérum.
Paramètres concomitants mesurés: Protéines totales LCR, quotient albumine LCR/sérum; électrophorèse des protéines sériques.

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 240.3