



Catalogue des analyses - Laboratoire

Progestérone

Sang

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Chimie clinique
Synonyme	P4

Prescription


Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang
------------------------------	--

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> Sang veineux
---------------	--


Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml héparinate de lithium 
	Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium le même tube suffit
---	--

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Microtube 0.3 ml héparinate de lithium

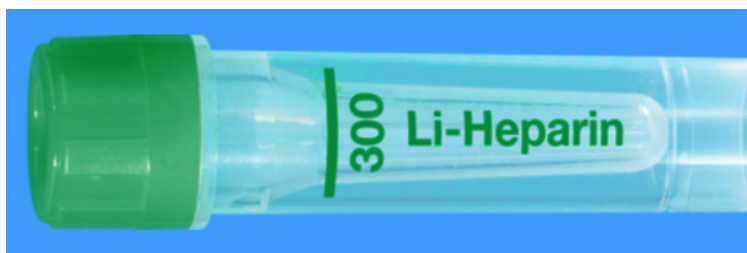

Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le plasma
- Vol. idéal (y compris sérothèque): 1 ml
- Vol. min. pour l'analyse seule: 0.2 ml

Conservation à 4°C
si >24 h, congeler à -20°C

Conditions d'acheminement Transporteur: à T° ambiante
Poste: à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">ECLIA
Analyseur	cobas e 801 / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	3 mois
Tarif	
Tarif (CHF)	17.4