



Catalogue des analyses - Laboratoire

Prolactine (PRL)

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
999069
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum	1 microtube bien rempli (pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Augmenter le nombre de microtubes
Traitement du prélèvement pour requérants externes	
Préparation	Centrifuger et décanter le plasma : - volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml - volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml
Conservation	Conserver le plasma à 4°C
Conditions d'acheminement	à T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24.</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode

- ECLIA

Analyseur

cobas e 801 / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

3 mois

Tarif

Tarif (CHF)

13.3