



Catalogue des analyses - Laboratoire

Protéines Tau, p-Tau-181P et b-Amyloïde-1-42

LCR

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Diagnostic de la maladie d'Alzheimer
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/mois
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Amyloïde, Tau, paramètres Alzheimer
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien 012 - Chimie clinique - Matériel spécial
Renseignements à fournir	Inscrire Tau, p-Tau et b-Amyloïde sous commentaire.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube Sarstedt en polypropylène 10mL stérile
N° de commande : 966681

Volume minimum

1 ml

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

3h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Le délai maximal jusqu'à la congélation du LCR est de 4 heures après la ponction.
Centrifuger durant 5 min à 2100G et décanter le LCR en au-moins 2 aliquots de 400 µl dans des microtubes Sarstedt (polypropylène).

Conservation

Conserver congelé dans congélateur à -80°C.

Conditions d'acheminement

Envoyer congelé sur glace carbonique.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Faire parvenir le LCR le plus rapidement possible à la Réception des laboratoires (délai maximal 3 heures après PL).

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24



Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Délai de rendu < 1 mois

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 145.8