

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Protéines totales

Urine 24h

## Informations générales

### Examen

#### Ajout d'analyse

Cette analyse  
peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

061220

Lien

[011 - Chimie clinique - Urine](#)

#### Renseignements à fournir

Volume et durée de la récolte.

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Instruction(s) particulière(s)

Mélanger à chaque miction dans un bocal gradué 2l (pour  
diurèse/récolte d'urine), conserver au frigo.

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

<b>Volume minimum</b>	2 ml
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires 24/24.</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Chimie clinique</a></u>

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Turbidimétrie</li></ul>
<b>Analyseur</b>	cobas 8000, Roche Diagnostics

## Post analytique

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	7.8
--------------------	-----