

Catalogue des analyses - Laboratoire

Quotient albumine

LCR / sérum

Informations générales

Examen

But de l'analyse Evaluation de l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique.

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 2x/semaine

Analyse accréditée OUI

Synonyme Rapport albumine LCR/sérum

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
061232
Lien
[012 - Chimie clinique - Matériel spécial](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)
- Sang

Instruction(s) particulière(s) Joindre obligatoirement 1 tube de sérum concomitant au tube de LCR.

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Contenant(s) autre(s)

Joindre un tube 4.9 ml sérum sans gel.

Volume minimum

LCR: 300 µl.

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Contenant(s) autre(s)

Joindre un microtube 0.3 ml sérum.

Volume minimum

Bien rempli.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le LCR (vol min 300 µl) et le sérum (vol min 300 µl).

Bien identifier les prélèvements de LCR et de sérum.

Conservation

Conserver le LCR et le sérum à 4°C.

Conditions d'acheminement

Envoyer le LCR et le sérum à 4°C.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web[Chimie clinique](#)**Résultats****Interprétation**

Calcul du rapport albumine LCR/sérum.

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

36