

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Sélénium

Sang


## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Analyse sous-traitée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chimie clinique</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	Se, selenium
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<p><b>Numéro de commande</b> 999069</p> <p><b>Lien</b> <a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a></p>

## Pré analytique

<b>Prélèvement</b>	
<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sang veineux</li> </ul>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 4.9 ml sérum sans gel

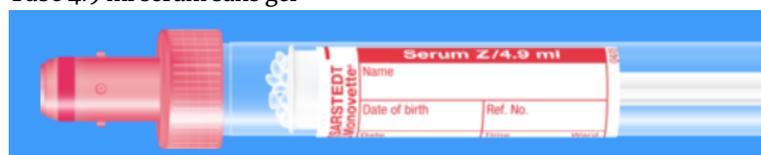

Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

**Contenant(s) autre(s)**

Tube 1.2 ml sérum

**Volume minimum**

1 ml

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Cuivre et zinc: le même tube suffit

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

3

**Contenant**

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Centrifuger et décanter sérum (min 0.4 ml)

**Conservation**

Sérum à 4°C

**Conditions d'acheminement**

Envoyer le sérum à T° ambiante

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**Bugnon 46  
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone**

021 31 44 280

**Site web**[Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de chimie clinique

**Site**

BH18-100

**Adresse**Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

24/24H

**Téléphone**

021 31 44 121

**Site web**[Chimie clinique](#)**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- ICP-MS

## Post analytique

**Tarif****Tarif (CHF)**

94.5