

Catalogue des analyses - Laboratoire

SHBG

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Fréquence et/ou horaire d'exécution 5/7 jours

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Synonyme Sex hormone-binding globulin, SBP, sex steroid-binding protein, sex binding protein, SEBG, TeBG, Testosterone Binding Globulin, SBG, Sex Binding Globulin, Sex Hormone Binding Globulin, Testosterone estradiol Binding Globulin, globuline liant les hormones sexuelles

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
999069
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml héparinate de lithium




Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 2

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium

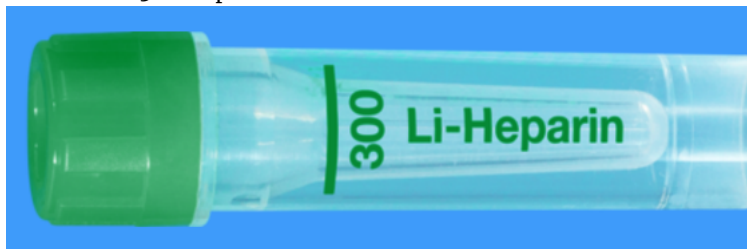

Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum 2 microtubes bien rempli
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré 24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le sérum :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

Conservation A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement Envoyer le plasma à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- CMIA

Analyseur Architect i1000/ ABBOTT

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 27