

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# SHBG


Sang

## Informations générales

### Examen

<b>Ajout d'analyse</b>	possible si sérothèque existante
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Fréquence et/ou horaire d'exécution</b>	5/7 jours
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chimie clinique</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	Sex hormone-binding globulin, SBP, sex steroid-binding protein, sex binding protein, SEBG, TeBG, Testosterone Binding Globulin, SBG, Sex Binding Globulin, Sex Hormone Binding Globulin, Testosterone estradiol Binding Globulin, globuline liant les hormones sexuelles
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999069 <b>Lien</b> <a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a>

## Pré analytique

<b>Prélèvement</b>	
<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sang veineux</li> </ul>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 4.9 ml héparinate de lithium 


Monovette ISO bouchon VERT – N° commande : 998991

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

## Matériel pédiatrique

**Quantité** 2

**Contenant** Microtube 0.3 ml héparinate de lithium

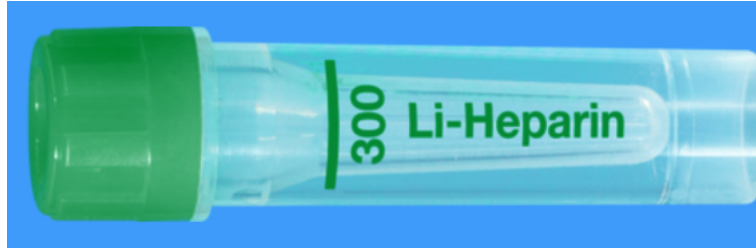

Microvette ISO bouchon VERT – N° commande : 999003

**Volume minimum** 2 microtubes bien rempli  
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Augmenter le nombre de microtubes

## Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** 24h

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation** Centrifuger et décanter le sérum :  
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml  
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml

**Conservation** A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

**Conditions d'acheminement** Envoyer le plasma à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

## Acheminement

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • CMIA

**Analyseur** Architect i1000/ ABBOTT

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 3 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 27